[Schulstempel] Stadt Halle (Saale) "Marguerite-Friedlaender-		
Ges	samtschule"	
Ing 06	olstädter Straße 33 128 Halle (Saale)	
Einverständniserklärung zur Selbstanwendung von		
SARS-CoV-2-Antigen-Selbsttests		
bei Schülerinnen und Schülern		
	bei Genalerinner	i dila Schalerii
Name de Octobre	1 1 0 1 11	
Name der Schülerin oder des Schülers:		
Klasse:		
Ich habe die Produkt- und Anwendungsinformationen zu den aktuell in den Schulen des		
		S-CoV-2-Antigen-Selbsttests zur Kenntnis
genommen. Diese		
_		19/sars-cov-2-rapid-antigen-test-patienten-
n/ abrufbar.	ICH-Zu-Mai Micitel //COVIG-	· 19/sal s-cov-z-i apiu-ai iligeri-test-patieriteri-
III abiuibai.		
5.		
		annte Schüler darf an den in der Schule
angebotenen SARS-CoV-2-Antigen-Selbsttests teilnehmen.		
J	a: []	Nein: []
	Zutreffendes bitt	e ankreuzen.
Ort und Datum:		
Unterschrift einer/eines Erziehungsberechtigten:		

SARS-CoV-2 **Rapid Antigen Test**

Kurzanleitung für Patienten

Diese Anleitung unterstützt Sie bei der Verwendung des SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test. Lesen Sie vor der Verwendung dieses Tests unbedingt die Gebrauchsanweisung für Patienten.

Naben Sie Fragen?
Eine schnelle Antwort auf häufig gestellte Fragen finden Sie um www.roch.cd/sq-potienten oder fragen Sie Ihren Apotheker. Oder rufen Sie unser Kundenservice-Center an unter der Rufnu DB002324820 (Montag bis Freiteg von 08:30 – 18:00 Uhr).

Wichtige Sicherheitsinformationen

- Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife oder verwenden Sie ein Handdesinfektionsmittel, bevor Sie den Test durchführen.
- Halten Sie den Tupfer sauber. Vermeiden Sie es. die Spitze des Tupfers zu berühren, und stellen Sie sicher, dass er vor der Verwendung keine Oberflächen berührt.
- Achten Sie darauf, dass Sie für die Probenentnahme die korrekten, beigelegten Abstrichtupfer des Herstellers "Miraclean Technology" verwenden (korrekt: P/N 93050; nicht zu verwenden: P/N 96000).

Komponenten des Testkits

Teststreifen



Verpackungsbeutel und Trockenmittel





Extraktionspuffer Röhrchen und Spenderkappe



Steriler Abstrichtupfer (Marke: Miraclean, P/N 93050)

Diese Komponenten sollten Sie zur Testdurchführung vor sich haben:


- Teststreifen (einzeln verpackt im Verpackungsbeutel mit Trocken-
- Röhrchen mit Extraktionspuffer
- Spenderkappe
- Steriler Abstrichtupfer (Marke: Miraclean)

Was Sie noch zusätzlich benötigen:

Stoppuhr

Test vorbereiten

1. Lesen Sie die Gebrauchsanweisung für den Patienten für den SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test genau durch.

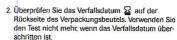



3. Öffnen Sie den Verpackungsbeutel an der Einrisslinie und entnehmen Sie den Teststreifen sowie die Tüte mit Trockenmittel.

4. Vergewissern Sie sich, dass der Teststreifen unversehrt ist und dass die Statusanzeige des Trocken-mittels gelb ist (= zur Verwendung geeignet).





2 Nasenabstrichprobe entnehmen und vorbereiten

- Waschen Sie Ihre Hände mit Wasser und Seife oder verwenden Sie ein Handdesinfektionsmittel, bevor Sie den Test durchführen.
- 2. Nehmen Sie den Abstrichtupfer aus der Verpackung. Achten Sie dabei darauf den Tupfer nur am Griff zu berühren, nicht an der Spitze mit dem .Wattebausch"
- 3. Neigen Sie Ihren Kopf leicht nach hinten
- 4. Führen Sie den Tupfer mit dem "Wattebausch" voran in ein Nasenloch ein. Schieben Sie den Tupfer langsam ca. 2 cm vorwärts (parallel zum Gaumen Richtung Rachen, nicht nach oben), bis Sie einen Widerstand spüren. Üben Sie dabei keinen Druck
- 5. Drehen Sie den Tupfer 4-mal (insgesamt ca. 15 Sekunden lang) gegen die Naseninnenseite und entnehmen Sie ihn dann aus der Nase.
- 6. Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 5 mit demselben Abstrichtupfer im anderen Nasenloch. **Hinweis:** Die Proben aus beiden Nasenlöchern müssen mit demselben Abstrichtupfer entno



7. Stellen Sie den Abstrichtupfer in ein Röhrchen mit Extraktionspuffer. Drücken Sie das Röhrchen im unteren Bereich zusammen und drehen Sie den Tupfer mehr als 10-mal hin und her. 8. Drücken Sie die Seiten des Röhrchens weiterhin

zusammen, während Sie den Tupfer entnehmen, um die gesamte Flüssigkeit aus dem Tupfer zu



WARNUNG! Wenn das Röhrchen nicht zusammengedrückt wird, kann ein Überschuss von Puffer am Tupfer zu falschen Ergebnissen führen.

9. Verschließen Sie das Röhrchen fest mit der Spenderkappe. Fahren Sie mit **Test durchführe**n fort.



3 Test durchführen

- 1. Legen Sie den Teststreifen auf eine ebene Fläche.
- 2. Halten Sie das Röhrchen senkrecht über das runde markierte Feld (nicht das rechteckige Ergebnisfenster).
- Tropfen Sie genau 4 Tropfen auf das Feld auf. Drücken Sie dafür falls nötig das Röhrchen leicht zusammen
- Hinweis: Sie können den Test auch fortsetzen, wenn Sie versehentlich 5 Tropfen aufgetragen haben



Stellen Sie die Stoppuhr und lesen Sie das Test-ergebnis nach 15 bis 30 Minuten ab.

WARNUNG! Wenn das Testergebnis nach mehr als 30 Minuten abgelesen wird, kann das Ergebnis falsch sein.





Interpretation der Ergebnisse

Ungültiges Testergebnis

1. Wenn keine Kontrolllinie (C) sichtbar ist, ist das Ergebnis als ungültig zu betrachten.

Der Test funktioniert nicht richtig und Sie sollten mit einem neuen Testkit einen neuen Test durchführen.

Schauen Sie genau hin: Auch wenn die Kontrolllinie Schaden Sie genau nit. Auch wenn die Kondomme schwach ist, sollte der Test als gültig bewertet werden. Möglicherweise haben Sie den Test nicht korrekt durch-geführt. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam und wiederholen Sie den Test. Bei weiterhin ungültigen Testergebnissen kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder ein COVID-19-Testzentrum.

2. Das Vorhandensein einer Testlinie (T) zusammen mit einer Kontrolllinie (C) bedeutet ein positives

Schauen Sie genau hin: Auch wenn die Testlinie schwach ist, sollte der Test als positiv bewertet

Ein positives Testergebnis bedeutet, dass Sie sehr wahrscheinlich an COVID-19 erkrankt sind. Bitte wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt/ Haus-arzt oder das örtliche Gesundheitsamt und halten Sie die örtlichen Richtlinien zur Selbstisolation ein. Gegebenenfalls wird Ihr Arzt einen Bestätigungstest mittels PCR verordnen

3. Das Vorhandensein einer Kontrolllinie (C) (egal wie schwach sie ist) aber keiner Testlinie (1), bedeutet ein negatives Ergebnis. Es ist unwahrscheinlich dass Sie an COVID-19 er-

krankt sind.

Auch bei einem negativen Ergebnis, sollten weiter-hin alle Schutz- und Hygienemaßnahmen eingehal-ten werden.

Im Verdachtsfall (d.h. wenn Sie anhaltende Symptome haben oder Ihre Symptome schwerwiegen der werden) wird empfohlen den Test nach 1-2 Tagen zu wiederholen, da das Coronavirus nicht in allen Phasen einer Infektion genau nachgewiesen werden kann. Bei Unsicherheit wenden Sie sich an Ihren Arzt/ Hausarzt.

Dokumentversion: 2.0 erarbeitungsdatum: Februar 2021 © 2021. Alle Rechte vorbehalten.